

NESTOSYL® 3-IN-1 WONDGEL BEHANDELING

Indicatie

Nestosyl 3-in-1 Wondgel is een parabeenvrije, hydrocolloïde gel die geschikt is voor de verzorging van lokale, droge of vochtige wonden. De wondgel is een medisch hulpmiddel dat de wondheling indirect bevordert door de micro-omgeving van de wond te regelen.

Toe te passen bij acute wonden zoals:

- oppervlakkige brandwonden
- schaafwonden
- heilkundige wonden
- lichte vorm van doorligwonden, indien vastgesteld door een arts

Eigenschappen en samenstelling

Nestosyl 3-in-1 Wondgel bestaat uit een zuur carbomeer dat gestabiliseerd wordt door carnosine, een basisch peptide dat van nature aanwezig is in de huid. In droge wonden, zoals schaafwonden en heilkundige wonden, zorgt de bedekking met dit carbomeer voor een occluderend effect: het houdt de verdamping van vocht tegen en vermindert het vochtverlies door de opperhuid. Carnosine buffert de zure polymeren en is tevens een antioxidant. Op natte, vochtafgevendende wonden absorbeert het carbomeer het overtollige wondvocht. De wondgel verkoelt, verzacht het contact met pleisters en/of verband en verkleeft niet.

De wondgel bevat geen irriterende parabenen als bewaarmiddel maar wel zilvertitraat.

Samenstelling: zuur colloïdaal carbomeer, carnosine, water, bewaarmiddel: zilvertitraat.

Gebruiksaanwijzing

Gesloten wonden:

- reinig en ontsmet de plaats van behandeling
 - breng de wondgel aan op de wond zonder deze met de pompflacon aan te raken
 - breng verband of pleister aan indien nodig
- Open wonden:*
- reinig en ontsmet de wond
 - voorzichtig droogdeppen
 - breng een dikke laag (0,5-0,75 cm) aan op de wond
 - breng een verband of pleister aan
 - vervang dagelijks het verband of de pleisters en breng een nieuwe laag aan

**Opgelet - Bij brandwonden:
Deze direct met veel water koelen.**

Nestosyl 3-in-1 Wondgel is niet de eerste maatregel bij brandwonden! Koel de wond onmiddellijk gedurende een twintigtal minuten af onder lauw, stromend water. Deze handeling moet zo vlug mogelijk plaatsvinden omdat het gunstige effect na 30 minuten afneemt en verdwijnt. Om het gevaar van onderkoeling te voorkomen is het advies niet te koud water, vooral wanneer de verbranding een grote oppervlakte bestrijkt.

Pas later wanneer de ernst van de brandwond goed is ingeschat, de wondgel toepassen.

Bijzondere voorzorgen

Er zijn geen ongewenste effecten zoals irritatie of overgevoeligheid bij gebruik volgens gebruiksaanwijzing bekend. *Nestosyl 3-in-1 Wondgel* is niet geschikt voor gebruik op de ogen, oogleden of op slijmvlieszen.


Raadpleeg steeds een arts:

- voor grotere, uitgebreide of zeer diepe wonden
- voor kleine, sterk geïnfecteerde wonden
- in geval van trage genezing of risico op complicatie

In deze gevallen is *Nestosyl 3-in-1 Wondgel* ook nuttig maar volstaat het geenszins als enige behandeling.

Het product niet meer gebruiken wanneer de vervaldatum verstreken is [zie verpakking].

Uitwendig gebruik.

 Oystershell NV
Booiebos 24
9031 Drongen
BELGIUM

Distributeur:
Remark Pharma
Industrieweg 24
7949 AK Meppel

NESTOSYL®

Inhoud 75 g e



Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in november 2012.

3879/1302
07020174
601/020175/12K

voor meer informatie www.nestosyl.nl